

Mund-Nasen-Abdeckung mit Wechselfilter



Produktbeschreibung

- robuster Kunststoffträger mit elastischen Ohrenschlaufen
- Ergonomisch geformt
- Leicht auswechselbarer Wechselfilter
- Wechselfilter einlagig aus lebensmittelkonformem PP/PET Nadelfilz
- Kunststoffträger abwaschbar und desinfizierbar
- Wechselfilter waschbar bis 60°C, Wäschenetz benutzen, NICHT bügeln

Gebrauchsanweisung:

- Vor und nach An- / und Ablegen Hände gründlich waschen und desinfizieren
- Abdeckung während des Tragens nicht berühren
- Über Mund und Nase tragen
- Bei Durchfeuchtung Wechselfilter wechseln und gebrauchten Wechselfilter luftdicht verpacken
- Gebrauchte Wechselfilter zügig waschen oder im Restmüll entsorgen
- Beim Tragen Sicherheitsabstand von 1,50 m einhalten

Zertifiziert vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie

*Keine Zertifizierung gemäß DIN EN 14683 und 149:2001-10
Kein Medizinprodukt, keine PSA*

Schützt nicht vor Ansteckung durch SARS-CoV-2 Virus oder anderen Viren oder Bakterien

Nicht steril verpackt

ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet

Montageanleitung umseitig

Ihre Vorteile:

- Reduziert Verbreitung von Tröpfchen
- Komfortabel
- Wiederverwendbar
- Desinfizierbar
- Leicht und Robust
- Kostengünstig




Kontakt

Kayser Filtertech GmbH
Baustraße 38
37574 Einbeck


www.kayser-filtertech.com
masks@kayser-filtertech.com

Tel.: +49 (0) 5561 79020


Stellen Sie sicher, dass der Kunststoffträger sauber und desinfiziert ist. Desinfizieren Sie sich Ihre Hände, damit der Filterstoff nicht verunreinigt wird.

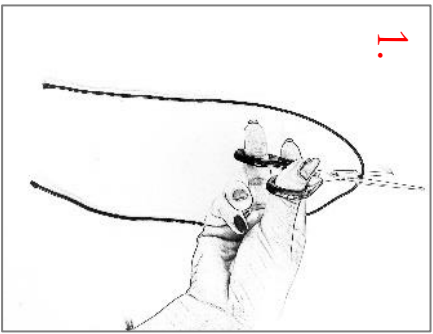


1. Schneiden Sie das elastische Band mittig durch.

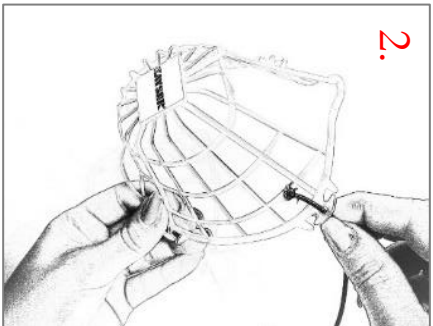


2. Ziehen Sie das Band durch das obere Loch des Kunststoffträgers und Knoten Sie es vor dem Loch zu.

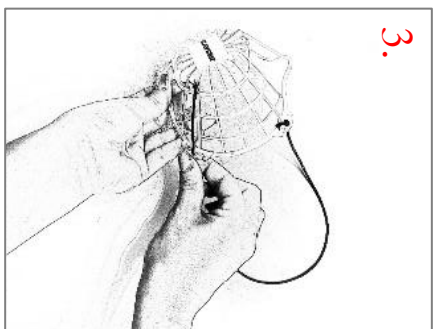


3. Fädeln Sie nun das Band durch das Loch darunter.

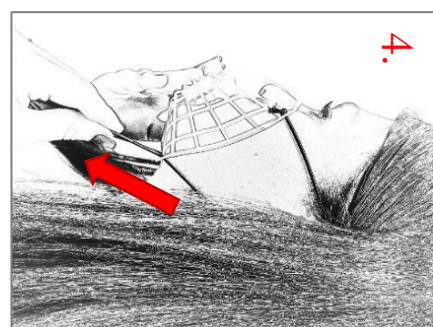


4. Setzen Sie die Maske auf, um die Länge des Bandes zu bestimmen. Die Maske sollte nicht zu eng sein.

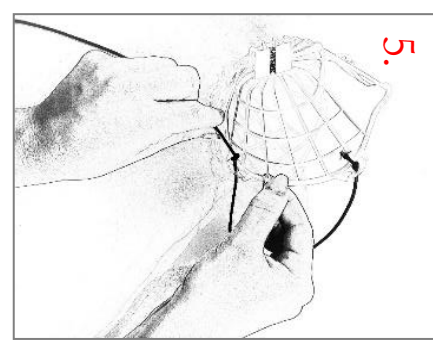


5. Knoten Sie das Band auch vor dem Loch zu. Um die Bänder danach zu verkürzen, ist es möglich, das Band um die Haltebügel zu wickeln.

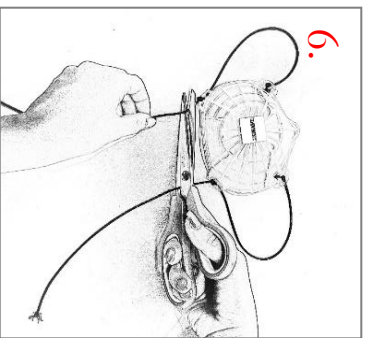


6. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Band auf der anderen Seite. Schneiden Sie das übrige Band ab.

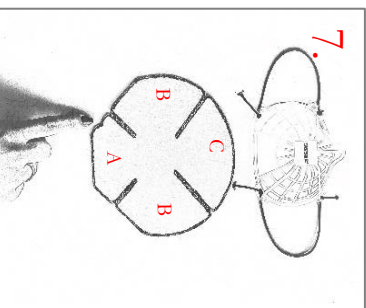


7. Platzieren Sie den Wechselfilter mit der geraden Schnittkante vor sich. Achten Sie darauf, dass die Einkerbung auf der linken Seite ist.

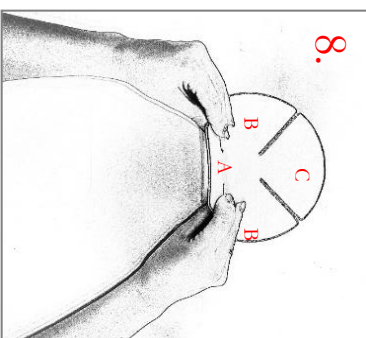

8. Drücken Sie den Wechselfilter so in den Kunststoffträger, dass die seitlichen Laschen (B) die Lasche oben (C) überlappen und die untere Lasche (A) über den seitlichen Laschen (B) liegt. Der Kunststoffträger muss vom Wechselfilter vollständig bedeckt sein.

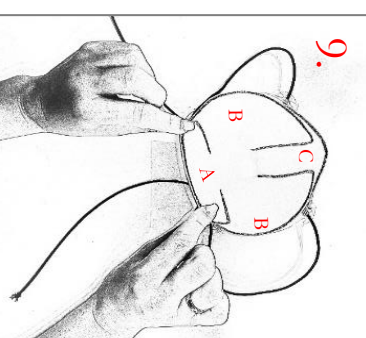

9. Klappen Sie die Seite mit der geraden Schnittkante nach oben. Nehmen Sie sich die Maske.

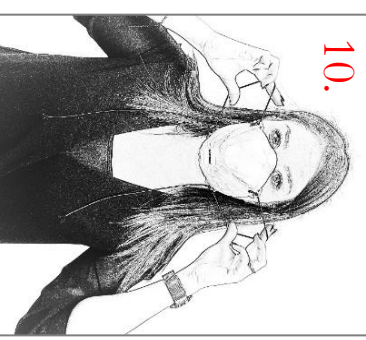

10. Setzen Sie nun die Maske auf. Sofern Sie keine Druckstellen verspüren und der Filterträger überall dicht am Gesicht anliegt, sitzt er korrekt.